

### *GHOD-PAP (холестериноксидазный метод)*

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

| Подробности        |            | Объёмы теста       |        | Контрольные интервалы |                          |
|--------------------|------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| ★ Тест             | CHOL       |                    |        | Автоповтор            | <input type="checkbox"/> |
| Наим. отчёта       | Холестерин |                    |        | Он-лайн калибров      | <input type="checkbox"/> |
| Ед.                | mmol/l     | Знаки п/запятой    | 2      | Cuvette Wash          | <input type="checkbox"/> |
| Основная дл. волны | 505        | Вспомогат.         | 700    | Всего реагентов       | 1                        |
| Тип метода         | 1POINT     | Тип калибровки     | Linear | ★ Реагент R1          | CHOL R1                  |
| Нач. M1            | 0          | Кон. M1            | 0      |                       |                          |
| ★ Нач. M2          | 60         | ★ Кон. M2          | 62     |                       |                          |
| Дубли пробы        | 1          | Дубли стандарта    | 2      |                       |                          |
| Дубли контроля     | 1          | Интервал контроля  | 0      |                       |                          |
| Напр-ние реакции   | Увеличение | Предел погл.       | 0.0    |                       |                          |
| Предел прозоны, %  | 0          | Проверка прозоны   | .      |                       |                          |
| Предел лин-сти, %  | 0          | Приращ. погл./мин. | 0.0    |                       |                          |
| Технич. минимум    | 0.08       | Технич. максимум   | 19.4   |                       |                          |
| Y=aX+b             | a= 1       | b=                 | 0      |                       |                          |

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

| Подобности  |   | Объёмы теста |    | Контрольные интервалы |        |
|---|---|--------------|----|-----------------------|--------|
| Тест  | : | CHOL         |    |                       |        |
| Тип пробы   | : | SERUM        |    |                       |        |
| Объёмы проб   |   |              |    |                       |        |
| ★ Норм.   | : | 2.0          | µl | Проп. развед.         | : 1 X  |
| Увелич.   | : | 4.0          | µl | Проп. развед.         | : 1 X  |
| Уменьш.   | : | 2.0          | µl | Проп. развед.         | : 2 X  |
| ★ Объём стандарта   | : | 2.0          | µl |                       |        |
| Объёмы реагентов и скор. мешалки  |   |              |    |                       |        |
| ★ Объём R1  | : | 200          | µl | ★ Скор. мешалки R1    | : Выс. |
| <div> <div>Типы проб</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> SERUM<br/> <input type="checkbox"/> URINE<br/> <input type="checkbox"/> CSF<br/> <input type="checkbox"/> PLASMA<br/> <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD<br/> <input type="checkbox"/> OTHER </div> </div> |   |              |    |                       |        |
|   |   |              |    | КОПИР. ОБЪЁМЫ         |        |
|   |   |              |    | ПРОСМ. ОБЪЁМОВ        |        |

# Холестерин

GHOD-PAP (холестериноксидазный метод)

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объёмы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : CHOL

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

| Контр. интервал |               |
|-----------------|---------------|
| Нижн. предел    | Верхн. предел |
| ★ Норм. : 0     | 5.2           |
| Экстр. : 0      | 0             |

Типы проб

- ☒ SERUM
- ☐ URINE
- ☐ CSF
- ☐ PLASMA
- ☐ WHOLE BLOOD
- ☐ OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объёмы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : CHOL

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

| Контр. интервал |               |
|-----------------|---------------|
| Нижн. предел    | Верхн. предел |
| ★ Норм. : 0     | 5.2           |
| Экстр. : 0      | 0             |

Типы проб

- ☒ SERUM
- ☐ URINE
- ☐ CSF
- ☐ PLASMA
- ☐ WHOLE BLOOD
- ☐ OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !