

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объёмы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: MG			Автоповтор	: <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: Магний			Он-лайн калибров	: <input type="checkbox"/>
Ед.	: mmol/l	Знаки п/запятой	: 0	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны	: 546	Вспомогат.	: 700	Всего реагентов	: 1
Тип метода	: 1POINT	Тип калибровки	: Linear	★ Реагент R1	: MG R1
Нач. M1	: 0	Кон. M1	: 0		
★ Нач. M2	: 8	★ Кон. M2	: 9		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0,02	Технич. максимум	: 2,05		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объёмы теста		Контрольные интервалы	
Тест	:	MG			
Тип пробы	:	SERUM			
Объёмы проб					
★ Норм.	:	2.0	µl	Проп. развед.	: 1 X
Увелич.	:	4.0	µl	Проп. развед.	: 1 X
Уменьш.	:	2.0	µl	Проп. развед.	: 2 X
★ Объём стандарта	:	2.0	µl		
Объёмы реагентов и скор. мешалки					
★ Объём R1	:	200	µl	★ Скор. мешалки R1	: Выс.
<div> <div>КОПИР. ОБЪЁМЫ</div> <div>ПРОСМ. ОБЪЁМОВ</div> </div>					

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности   Объемы теста   **Контрольные интервалы**

Тест : MG

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм. : 0.73	1.06
Экстр. : 0	0

Типы проб

- ☒ SERUM
- ☐ URINE
- ☐ CSF
- ☐ PLASMA
- ☐ WHOLE BLOOD
- ☐ OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности   Объемы теста   **Контрольные интервалы**

Тест : MG

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм. : 0.77	1.03
Экстр. : 0	0

Типы проб

- ☒ SERUM
- ☐ URINE
- ☐ CSF
- ☐ PLASMA
- ☐ WHOLE BLOOD
- ☐ OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !