

HDL, Липопroteины высокой плотности, ЛПВП

Прямой, иммуно

Параметры для ввода в программу анализатора: Торус 1210; VitaLine 200.

Значения полей отмеченных красным шрифтом выбираются пользователем.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

КОНТРАКЧЕСТВА

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

СТАТИСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОЧИЙ МОНИТОР

ВЫХОД

ПАРАМЕТРЫ

Параметры теста

Профили

Последовательность проведения тестов

Вычисляемые тесты

Внешние тесты

Рефлекс тесты

Тест

Код теста

Полное название

Тест

Код теста

Основной фильтр

Длительный фил

Ед.изм.

Кол.зн.посл.зпт

Объем R1 (мкл)

МЕСТО R1

Время инкубации (с)

ъем флакс

Объем R2 (мкл)

МЕСТО R2

Время инкубации (с)

ъем флакс

Объем образц.(мкл)

Время считыв.(с)

рость вращ. микс

Произв.реак.

Дiasys

Лизирующий р

Информация о реагенте R1

Информация о реагенте R2

Номер лота

Штрихкод R1

Срок годности

действительно дн

Номер лота

Штрихкод R2

Срок годности

действительно дн

Добавить

Удалить

Сохранить

Печать предв.просмотр

Печать

Импорт

Экспорт

Stormoff®

Тест

Код теста

Полное название

Тест

Код теста

Основной фильтр

Длительный фил

Ед.изм.

Кол.зн.посл.зпт

Объем R1 (мкл)

МЕСТО R1

Время инкубации (с)

ъем флакс

Объем R2 (мкл)

МЕСТО R2

Время инкубации (с)

ъем флакс

Объем образц.(мкл)

Время считыв.(с)

рость вращ. микс

Произв.реак.

Дiasys

Лизирующий р

Информация о реагенте R1

Информация о реагенте R2

Номер лота

Штрихкод R1

Срок годности

действительно дн

Номер лота

Штрихкод R2

Срок годности

действительно дн

Добавить

Удалить

Сохранить

Печать предв.просмотр

Печать

Импорт

Экспорт

* Выбирается пользователем.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

СТАТИСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОЧИЙ МОНИТОР

ВЫХОД

ПАРАМЕТРЫ

Stormoff®

Параметры теста

Профили

Последовательность проведения тестов

Вычисляемые тесты

Внешние тесты

Рефлекс тесты

Тест

Код теста

Полное название

ЛПВП

Тест

HDL

Код теста

NN

Основные параметры

Нормальные величины

Калибровка

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
HDL	NN
AMY	18
ALP	19
ALB	20
Amy.urea	21
TrpUr	22

Количество стандартов

Тип калибровки

1	поз1	0		
2	поз2	**		
3				
4				
5				
6				

К =

Ист.калибр.

Добавить

Удалить

Сохранить

Печать
предв.просмотр

Печать

Импорт

Экспорт

** -вводится из паспорта к калибратору

Калибровка линейная, (калибратор TruCal HDL/LDL, (TruCal Lipid на регистрации)). Рекомендуется контроль TruLab L уровень 1 и 2. Можно использовать TruLab N и TruLab P.