

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)



Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Тип реакции **КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

| | | | | | |
|-------------|-----------|----------|---------|---------|---|
| Метод | LDL | Название | ЛПНП | Маркир. | |
| Тип образца | Сыворотка | Ед. | ммоль/л | Десятые | 2 |
| Штрих-код | | Версия | | | |

Главное меню

Количественный

Ограничения

Контр.класс

Перемещенный вперед

Длина волны (нм)

Главное меню

590

Боковой

700

Считываемые показатели

Время (сек)

300

Доп. точность

Подача

Изделие

Объем (мкл)

Время (сек)

Разлить при помощи

Доп. объем (м KitVol (ul))

Образец

2

60

1-й реагент

180

0

Дополнитель

10

0

2-й реагент

45

240

Дополнитель

5

0

3-й реагент

Разбавитель образца

Вода

Используйте дополни

0

DIL

Предварительное разбавл

Фактор

1

Инкубация

0

Главное меню

Количественный

Ограничения

Контр.класс

Перемещенный вперед

Преобразование единиц

Фактор

1.0000

Смещение

0.0000

Направление

По восходящей

Проверка направления

Тип калибровки

Кривая/линейная

Время действительности (μ

15

Фиксированные точки

2

Обязательная формула

Линейный

Фактор

1.0000

Используйте из данной мето

12

Бланк реагента

Введено в действие

Замена образца при помощи

Разбавитель

DIL

Время действитель

1

Часы

Копии по умолчанию

1

Выполнен автоматически

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)



Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Главное меню Количественный **Ограничения** Контр.класс Перемещенный вперед < >

| | | | |
|---|--------------|---|--------|
| Пределы действительности концентрации | | Автоматическое утверждение бланка реагента | |
| Низкий | 0.03 | <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 |
| Высокий | 10.3 | <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 |
| | Больше образ | | |
| | Предваритель | | |
| Проверка целостности ограничений абсорбции | | Автоматический прием фактора калибровки | |
| <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 | <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 |
| <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 | <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 |
| | | <input type="checkbox"/> % замены | 0.0000 |
| Пределы дублирования концентрации | | | |
| <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 | | |
| <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 | | |

Главное меню Количественный **Ограничения** Контр.класс Перемещенный вперед < >

| Идентиф. | Низкий | Высокий |
|----------|--------|---------|
| Female | 0 | 3.4 |
| Male | 0 | 3.4 |

Для страниц «Перемещенный вперед» и «Замена» оставить значения по умолчанию.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.