

ИттипотД (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Т	Перенос	Профиль	Выч.	Внесист	STAT
---	---------	---------	------	---------	------

Т.

Лип-а

☒ Основ
☐ Номин
☐ Калиб
☐ Контр
☐ Инд.с
☐ Кач.ум.

Информация теста

№

Т

П.наз

Стан№

Объем ргт

R1

R2

R3

R4

Объем проб

Станд

Увел.

Умен.

Параметры реакции

Тип р Напр.

Пер.к Хол р

Вто.к Вр.в.

Настройка результ

Десят Уг.

Бл. Отс.

Критерии правил

Погл. Диап.

Увел. Лимит

Умен. М суб

☐ Проз. ☐ Част ☐ Ант

Q1 Q2 Q3 Q4

PC ABS

Добав

Удал.

Сохран.

Отмен

Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Липопротейн (а)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек (набор стандартов TruCal Lp(a), 5 уровней + вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Lp(a) уровень 1 и уровень 2.