

ЛДГ, LDH (Лактатдегидрогеназа)

ДиаС, ДДС

Параметры теста 1

Параметры теста 2

Общие положения

Наименование:

ЛДГ

Аббревиатура:

LDH

Код:

*

Метод:

Кинетика

Длина Волны:

340

нм

Единицы:

Ед/л

Десятичных знаков:

1

ПовторовТест:

1

Пределы концентрации

1

-

2500

U/l

Назв. калибратора:

TruCal U

Проверка прозоны:

Нет

Типы проб

Normal

Urine

Разрешено:

Да

Предразведение:

Нет

Референсные значения

Мужской:

0

-

480

U/l

Женский:

0

-

480

U/l

Педиатрический:

0

-

0

U/l

Панический:

0

-

0

U/l

Управление

Контроль №1:

TruLab N

Контроль №2:

TruLab P

Контроль №3:

Корреляция

Корреляц. фактор:

1,000

Корреляц. сдвиг:

0

U/l

Параметры теста 1

Параметры теста 2

Общие положения

Наименование:

ЛДГ

Предразведение:

Нет

Проба

Бланк Пробы:

Нет

объем пробы:

18

μл

при перезапуске:

3

μл

Реактивы

Бланк Реагента:

Нет

объем пробы:

180

μл

при перезапуске:

180

μл

Добавление реактива через -2,25 минут (R1)

0

μл

Добавление реактива через 2,90 минут (R2)

0

μл

Добавление реактива через 4,70 минут (R3)

45

μл

Измерение

Бланк Наклона:

Нет

Инкубация, изм-ие:

61

158

сек

при несовпадении точек выбрать ближайшее

Предел линей-ти:

50,0

%

Пределы абсорбции

Абсорбция:

-0,100

-

3,000

Абс

Абсорбция R:

-0,100

-

3,000

Абс

Истощение субстрата

0,100

Абс